



Produit d'entretien lentilles Regard 3x355 ml + 3 étuis

Solution d'entretien multifonction sans conservateurs du laboratoire HORUS PHARMA pour vos lentilles souples (même silicone-hydrogel). 3 Flacons de 355 ml + étuis.



Marque :Horus Pharma
Référence :OL8301
Points de fidélité offerts :29

Prix :29.00 €

Descriptif :

Solution d'entretien multifonction sans conservateurs du laboratoire HORUS PHARMA pour vos lentilles souples (même silicone-hydrogel).

3 x Flacons de 355 ml + étuis.

REGARD® est une innovation scientifique pour l'entretien des lentilles de contact qui leur procure un meilleur confort ainsi qu'une décontamination optimale. REGARD® contient un décontaminant actif de nouvelle génération (molécule complexe stabilisée "Oxychlorite") qui se transforme dans l'oeil en composants physiologiques des larmes (H₂O et NaCl) et libère de l'oxygène. La tolérance oculaire est parfaite en l'absence de conservateur tel que le PHMB. REGARD® nettoie, rince, désinfecte, conserve et lubrifie les lentilles de contact souples. Sa formulation permet aussi de prévenir les dépôts protéiques. Regard® est une solution stérile, isotonique et tamponnée contenant de l'eau purifiée, du chlorure de sodium, du poloxamer, de l'hydroxypropylméthylcellulose (0,15 %), du chlorite de sodium et du peroxyde d'hydrogène à très faible concentration (0,01 %).

Utilisation

Lavez toujours vos mains avec soin avant de retirer les lentilles.

Versez quelques gouttes de REGARD® sur les lentilles de contact et masser délicatement la surface pour les nettoyer.

Rincez les lentilles avec REGARD® pour éliminer les dépôts.

Posez les lentilles dans l'étui et le remplir avec la solution de REGARD®.

Laissez les lentilles dans la solution pendant au moins 4 heures pour les décontaminer et éliminer les dépôts protéiques. REGARD® détruit les micro-organismes dangereux ainsi que leurs toxines et enzymes. Si vous conservez les lentilles pendant plus de 30 jours dans la solution, recommencez la décontamination avant de les remettre.

REGARD® peut être utilisé pour hydrater et lubrifier les lentilles avant la pose.

Rincez l'étui avec REGARD® après chaque utilisation et laissez le sécher à l'air.

Précautions d'emploi :

REGARD® ne doit pas être ré-utilisé. Evitez tout contact avec l'embout du flacon et refermez-le bien après chaque utilisation. Conservez le flacon à température ambiante. Gardez le flacon éloigné de toutes sources de chaleur. Après ouverture la solution doit être utilisée dans les 90 jours (3 mois). Jetez toute solution restante après ce délai. Comme pour tous produits de ce type, arrêtez l'utilisation en cas d'irritation ou d'allergie à l'un des composants et consultez un ophtalmologiste. Gardez le produit hors de portée des enfants. Ne pas avaler.

[Lien vers la fiche du produit](#)